


CONSIGLI UTILI PER UN CORRETTO MANTENIMENTO DELLO STRUMENTARIO

NIKE
strumenti chirurgici odontoiatrici



1. PRIMO UTILIZZO:

Prima di sterilizzare lo strumento lavarlo negli ultrasuoni.

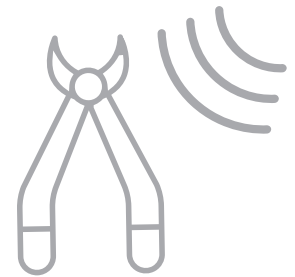

2. STRUMENTI CON PARTI IN ATTRITO:

Forbici, pinze, portaghi. Prima della sterilizzazione aprire le parti di snodo e spazzolare bene, con il tempo si accumula ossido e sporcizia.



3. STRUMENTI CON PARTI IN ATTRITO:

Dopo il lavaggio, disinfezione e prima di imbustarlo, lo strumento deve essere lubrificato nelle parti in attrito con un olio siliconato e imbustato aperto.



BUON LAVORO!